

Mangez, buvez et dormez avec les **Bandelettes Détente** !


Chillin
strips™

orthocare essentials™

Remplace la cire de silicone

bouche saine
cacao glacé

sel marin minéraux et
éléments fonctionnels

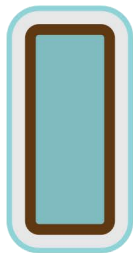

confort instantané
pour les dents et
les gencives

jusqu'à 2 heures
se dissout dans
la bouche

6 lamelles

Protège les dents sensibles et les gencives fragiles

Apaise et soulage l'inconfort

Idéal pour les appareils dentaires, les gouttières et d'autres encore !



Détendez-vous, mangez, buvez et dormez avec les **Bandelettes Détente** !

Chillin
strips™

orthocare essentials™

La formulation innovante des **Bandelettes Détente** a été créée par un orthodontiste afin d'apporter une solution basée sur la science et la recherche à la gêne occasionnée par le port de gouttières ou d'appareils orthodontiques. Notre formulation est la première à fournir des ingrédients qui apaisent l'irritation de la gencive sensible, de la muqueuse buccale, du palais mou et dur et qui réconfortent l'émail sensible.



Scanner pour
commander

- Fabriqué avec des ingrédients fonctionnels et bénéfiques
- Offre la meilleure formulation jusqu'à 2 heures ou plus
- Aide à apaiser et à protéger la bouche, les dents et les gencives
- Se dissout dans la bouche n'importe où, n'importe quand
- **Manger, boire et même dormir** avec les Bandelettes Détente
- Utilisation sans danger sous les protège-dents



Voici comment utiliser les Bandelettes Détente

1. Ouvrir les Bandelettes Détente. Si vous le souhaitez, conservez-les au réfrigérateur pour plus de fraîcheur.
2. Découper 1 Bandelette Détente en le tenant par les bords.
3. Conservez le reste des Bandelettes Détente dans l'emballage et fermez-le.
4. Placez la Bandelette Détente sur vos dents et/ou votre gencive (toute plaie dans la cavité buccale), en centrant sur la zone problématique.
5. Appuyez sur les appareils orthodontiques et les gouttières, en poussant au-dessus et en dessous sur les gencives et les dents. L'adhérence est activée par la salive qui permet une meilleure moulabilité.
6. Gardez la bandelette pendant 2 heures maximum ou jusqu'à dissolution complète.
7. Si vous devez l'enlever avant, utilisez une brosse à dents pour la retirer.

Ingrédients : Glycérine, pectine, xylitol, carboxyméthylcellulose, pullulan biologique, poudre de cacao, sel de la mer morte, gélatine, menthol, beurre de cacao, extrait de cacao, extrait de vanille, sucralose, arôme naturel de menthe poivrée, eugénol, FD&C bleu n° 1.

Tous droits réservés Brevet en instance Fabriqué aux États-Unis Fabriqué pour : ORTHONU, LLC. Rumson, NJ 07760

