

Coma, beba e durma com **Chillin' Strips**!

**Chillin'**  
strips™


orthocare essentials™

Substitui a cera de silicone

boca saudável  
cacau gelado



minerais de sal marinho  
e elementos funcionais

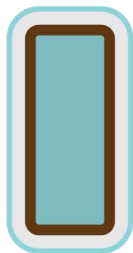

conforto imediato  
para dentes e  
gengivas  
durante até 2 horas  
dissolve-se  
na boca

6 tiras

Protege dentes e gengivas sensíveis

**Acalma e alivia o desconforto**

Ideal para aparelhos, alinhadores, entre outros!



Relaxe, coma, beba e durma com **Chillin' Strips**!

**Chillin'**  
strips™

orthocare essentials™

A formulação inovadora de **Chillin' Strips** foi criada por um ortodontista para fornecer uma solução orientada pela ciência e investigação para o desconforto durante o uso de aparelhos dentários e alinhadores. A nossa formulação é a primeira a fornecer ingredientes que acalmam a irritação provocada por gengivas, mucosa bucal, palato mole e duro sensíveis e alivia o esmalte sensível.



Digitalizar para  
encomendar

- Fabricado com ingredientes funcionais e benéficos
- Fornece a melhor formulação durante até 2 horas ou mais
- Ajuda a acalmar e a proteger a sua boca, dentes e gengivas
- Dissolve-se na boca em qualquer local e em qualquer altura
- **Coma, beba e até durma** com Chillin' Strips
- Utilização segura sob protetores bucais



**Como utilizar as Chillin' Strips**

1. Abrir as Chillin' Strips. Se desejado, conservar no frigorífico para uma maior arrefecimento.
2. Retirar uma Chillin' Strip segurando-a pelas extremidades.
3. Conservar as Chillin' Strips restantes na embalagem e fechar a embalagem.
4. Colocar a Chillin' Strip nos seus dentes e/ou gengivas (qualquer ferimento na cavidade oral), centrando-a na área afectada.
5. Pressionar os aparelhos dentários e alinhadores, empurrando-os para cima e para baixo nas gengivas e dentes. A fixação ativa-se com a sua saliva para uma melhor moldabilidade.
6. Manter a tira aplicada até 2 horas ou até se dissolver completamente.
7. Para a remover antes deste período, utilizar uma escova de dentes para a remover com a lavagem.

**Ingredientes:** Glicerina, pectina, xilitol, carboximetilcelulose, pululana orgânica, cacau em pó, sal do Mar Morto, gelatina, mentol, manteiga de cacau, extrato de cacau, extrato de baunilha, sucralose, aroma natural de hortelã, eugenol, FD&C azul n.º 1.

Todos os direitos reservados. Patente pendente. Fabricado nos EUA. Fabricado para: ORTHONU, LLC. Rumson, NJ 07760



8 50035 48902 4