

¡Come, beba y duerma con **Chillin'Strips**!

Chillin'
strips™


orthocare essentials™

Sustituye la cera de silicona

boca sana
cacao glacial



componentes funcionales y
minerales de sales marinas

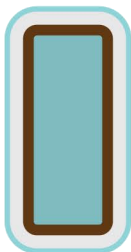

confort instantáneo
de los dientes y
las encías
por hasta 2 horas
se disuelve
en la boca

6 tiras

Protege los dientes sensibles y las encías adoloridas

Calma y alivia las molestias

¡Ideal para alineadores, aparatos ortodónticos y más!



¡Refréscese, coma, beba y duerma con **Chillin'Strips**!

Chillin'
strips™

orthocare essentials™

Las tiras **Chillin'Strips** contienen una formulación innovadora creada por un ortodoncista, que brinda una solución derivada de la ciencia y las investigaciones para aliviar las molestias durante el uso de alineadores y aparatos ortodónticos. Nuestra formulación es la primera en ofrecer ingredientes que alivian la irritación y el dolorimiento de las encías, la mucosa bucal y el paladar blando y duro, y calma el esmalte dental sensible.



Escanear para
hacer pedidos

- Hecho con ingredientes funcionales y beneficiosos
- Brinda la mejor formulación por hasta 2 horas o más
- Ayuda a aliviar la irritación y proteger la boca, los dientes y las encías
- Se disuelve en la boca en cualquier momento, en cualquier lugar
- **Coma, beba e incluso duerma** con Chillin'Strips
- Puede usarse sin peligro debajo de protectores bucales



Cómo usar las tiras **Chillin'Strips**

1. Abra las Chillin'Strips. Si lo desea, guárdelas en la nevera para más frescor.
2. Despegue 1 Chillin'Strip sujetándola por los bordes.
3. Guarde las Chillin'Strips restantes en el paquete; selle el paquete.
4. Póngase la Chillin'Strip en los dientes y/o las encías (sobre cualquier lesión que tenga en la cavidad bucal), centrándose en la zona afectada.
5. Haga presión sobre los alineadores o aparatos ortodónticos, empujando la tira hacia arriba y hacia abajo sobre las encías y los dientes. La adhesión se activa con la saliva para un moldeado óptimo.
6. Déjese puesta la tira durante hasta 2 horas o hasta que se haya disuelto completamente.
7. Si tiene que quitársela antes, elimínala lavándose con un cepillo de dientes.

Ingredientes: Glicerina, pectina, xilitol, carboximetilcelulosa, pululano orgánico, cacao en polvo, sales del Mar Muerto, gelatina, mentol, manteca de cacao, extracto de cacao, extracto de vainilla, sucralosa, sabor de menta natural, eugenol, azul FD&C n.º 1.

Reservados todos los derechos. Patente en tramitación. Hecho en EE. UU. Fabricado para: ORTHONU, LLC. Rumson, NJ 07760

