

Soulagez avec la **Bande confort** !



comforttape™

orthocare essentials™

Ruban adhésif pour les dents et les gencives

bouche saine
entièrement
naturel

sel marin minéraux et
éléments fonctionnels



aide instantanée
pour les dents
et les gencives
jusqu'à 1 heure
ou plus

6 bandelettes

Atténue et soulage les irritations

Soulage les dents et les gencives douloureuses

Idéal pour les appareils orthodontiques,
les gouttières et d'autres encore !



Soulagez avec la **Bande confort** !

comforttape™

orthocare essentials™

La formulation innovante de la **Bande confort** a été créée par un orthodontiste afin d'apporter une solution basée sur la science et la recherche à la gêne occasionnée par le port de gouttières ou d'appareils orthodontiques. Notre formulation est l'une des premières à contenir des ingrédients qui soulagent l'irritation de la gencive enflammée et l'émail sensible.



- Fabriqué à partir d'ingrédients naturels et fonctionnels
- Fournit la meilleure formulation pendant 1 heure ou plus.
- Contribue au confort et apaise les dents et les gencives
- Utilisation sans danger sous les protège-dents

Scanner pour
commander



Voici comment utiliser la **Bande confort**

1. Ouvrez la Bande confort et décollez un morceau en la tenant par les bords.
2. Sécher la zone à l'aide d'un tissu ou d'une gaze avant l'application pour une meilleure adhérence.
3. Conservez le reste de la Bande confort dans l'emballage et fermez-le.
4. Placez la Bande confort sur les dents, en utilisant les lignes perforées pour centrer la zone problématique.
5. Appuyez sur les appareils orthodontiques ou les gouttières, en poussant au-dessus et en dessous sur les gencives et les dents.
6. Maintenez la bande pendant 1 heure ou plus.
7. Ne mangez pas et ne buvez pas pendant ce temps afin d'optimiser le confort.
8. Vous pouvez l'enlever à tout moment et manger et boire normalement.

Tous droits réservés Brevet en instance Fabriqué aux États-Unis Fabriqué pour : ORTHONU, LLC. Rumson, NJ 07760

