

Sollievo con il **Comfort Tape!**

comforttape™

orthocare essentials™
Tape per denti e gengive

bocca sana
tutto naturale

elementi funzionali e
minerali del sale marino



sollievo
istantaneo per
denti e gengive
fino a un'ora
o più

6 strip

Attenua e lenisce le irritazioni

Dà sollievo ai denti sensibili e alle gengive doloranti

Ideale per apparecchi fissi, allineatori e altro ancora!



Sollievo con il **Comfort Tape!**

comforttape™

orthocare essentials™

La formula innovativa del **Comfort Tape** è stata creata da un ortodontista per una soluzione basata sulla scienza e sulla ricerca contro i disagi degli apparecchi ortodontici e degli allineatori. La nostra formula è tra le prime in assoluto a fornire ingredienti che leniscono l'irritazione delle gengive e danno sollievo in caso di smalto sensibile.



Scansiona per
ordinare

- Realizzati con ingredienti efficaci e naturali
- Formula attiva fino a un'ora o più
- Aiuta a dare sollievo ai denti e alle gengive
- Sicuro da usare anche con i bite



Come usare il **Comfort Tape**

1. Apri la confezione di Comfort Tape e staccane una striscia tenendola per il bordo.
2. Per una migliore aderenza, asciuga l'area con una garza prima dell'applicazione.
3. Conserva le rimanenti strisce di Comfort Tape nella confezione ben chiusa.
4. Centra il Comfort Tape sull'area irritata aiutandoti con le linee perforate.
5. Indossa l'apparecchio o l'allineatore, premendo sopra e sotto contro le gengive e i denti.
6. Tieni il tape per un'ora o più.
7. Per ottimizzarne l'effetto, non mangiare o bere durante questo arco di tempo.
8. Staccalo in qualsiasi momento per mangiare e bere normalmente.

Tutti i diritti riservati. Brevetti in corso di registrazione. Prodotto negli U.S.A. per: ORTHONU, LLC. Rumson, NJ 07760

