

Comfort Tape zapewni ulgę!



comforttape™

Comfort Tape zapewni ulgę!

comforttape™

orthocare essentials™

Taśmy na zęby i dziąsła

orthocare essentials™

zdrowa jama ustna
tylko naturalne
składniki

minerały soli morskiej
i aktywne składniki



natychmiastowa
ulga dla zębów
i dziąseł

do 1 godziny
lub dłużej

6 pasków

Łagodzi i koi podrażnienia

Uśmierza ból zębów i dziąseł

Doskonale sprawdza się w przypadku aparatów ortodontycznych, nakładek i nie tylko!



Zeskanuj, aby
zamówić

- Zawiera naturalne i aktywne składniki
- Skuteczna formuła, która działa przez godzinę lub dłużej
- Pomaga w zapewnieniu komfortu i złagodzeniu bólu zębów i dziąseł
- Bezpieczna do użycia z ochraniaczami na zęby



Jak używać Comfort Tape

1. Otwórz opakowanie z comfort tape i przytrzymując za brzoży odklej jeden pasek.
2. Aby zapewnić właściwe przyleganie, przed nałożeniem osusz chusteczką lub gazą problematyczny obszar.
3. Pozostałe paski Comfort Tape przechowuj w szczelnie zamkniętym opakowaniu.
4. Umieść Comfort Tape na zębach i kierując się perforowanymi liniami, skoncentruj się na problematycznym obszarze.
5. Nałóż na aparat ortodontyczny lub nakładkę, przyciskając powyżej i poniżej dziąseł i zębów.
6. Trzymaj założoną taśmę przez godzinę lub dłużej.
7. Aby zmaksymalizować komfort, w tym czasie nie jedz i nie pij niczego.
8. W dowolnej chwili odklej, aby normalnie jeść i pić.

Wszystkie prawa zastrzeżone Postępowanie patentowe w toku Wykonano w USA Wyprodukowano dla:
ORTHONU, LLC. Rumson, NJ 07760

