

¡Alivio con **Comfort Tape!**

# comforttape™

orthocare essentials™  
Cinta para los dientes y las encías

boca sana  
completamente  
natural

componentes  
funcionales y minerales  
de sales marinas



ayuda  
instantánea para  
dientes y encías  
hasta 1 hora  
o más

6 tiras

Alivia y reduce las irritaciones

Calma las encías y los dientes adoloridos

¡Ideal para alineadores, aparatos ortodónticos y más!



¡Alivio con **Comfort Tape!**

# comforttape™

orthocare essentials™

- La cinta **Comfort Tape** contiene una formulación innovadora creada por un ortodoncista, que brinda una solución derivada de la ciencia y las investigaciones para aliviar las molestias durante el uso de alineadores y aparatos ortodónticos. Nuestra formulación es la primera en ofrecer ingredientes que alivian la irritación de las encías inflamadas y calman el esmalte dental sensible.



Escanear para  
hacer pedidos

- Hecha con ingredientes naturales y funcionales
- Brinda la mejor formulación por hasta 1 hora o más
- Ayuda a aliviar y reducir las molestias de dientes y encías
- Puede usarse sin peligro debajo de protectores bucales



#### Cómo usar la cinta **Comfort Tape**

1. Abra la cinta Comfort Tape y despegue una pieza sujetándola por los bordes.
2. Antes de aplicarla, seque la zona con un pañuelito de papel o gasa para lograr una mejor adhesión.
3. Guarde la Comfort Tape restante en el paquete; selle el paquete.
4. Colóquese la Comfort Tape en los dientes, guiándose por las líneas perforadas para centrarse en la zona afectada.
5. Haga presión sobre los alineadores o aparatos ortodónticos, empujando la cinta hacia arriba y hacia abajo sobre las encías y los dientes.
6. Déjese puesta la cinta durante 1 hora o más.
7. Para maximizar el confort, no coma ni beba nada en este momento.
8. En cualquier momento podrá despegarla y comer y beber con normalidad.

Reservados todos los derechos. Patente en tramitación. Hecho en EE. UU. Fabricado para: ORTHONU, LLC.  
Rumson, NJ 07760

