

Verlicht pijn en ongemak met **mouth-aid**!



mouth-aid™


orthocare essentials™

Hulpmiddel voor weke delen in de mondholte

gezonde mond
natuurlijk



zeezoutmineralen en
functionele elementen

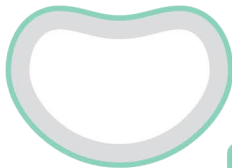

onmiddellijke
pijnverlichting
van zweetjes

gedurende 1-2 uur
of langer

6 mouth-aids

Beschermt de weke delen aan de binnenzijde
van lippen en wangen

Verlicht de pijn van zweetjes en irritatie

Fantastisch voor braces, aligners en meer!



Verlicht pijn en ongemak met **mouth-aid**!

mouth-aid™

orthocare essentials™

De innovatieve formulering van **OrthoChewz** is bedacht door een orthodontist die op zoek was naar een op wetenschap en onderzoek gebaseerde oplossing voor ongemak bij het dragen van aligners en beugels. **mouth-aid** is een van de eerste toepassingen van pijnverlichtende functionele ingrediënten voor irritatie in de mond. Of het nu is voor beugels of voor aligners tijdens een orthodontische behandeling: je kan **mouth-aid** zo vaak gebruiken als je maar wilt.



- Vervaardigd met functionele en natuurlijke ingrediënten
- Biedt de beste formulering wel 1 uur lang
- Verlicht pijn en beschermt de mond, binnenkant van lippen en wangen
- Beschermt weke delen in de mondholte

Scan om te bestellen



Hoe gebruik je mouth-aid

1. Open een pakje mouth-aid en droog het geïrriteerde gebied.
2. Trek 1 mouth-aid los door hem bij de randen beet te pakken.
3. Bewaar de rest van de mouth-aids in de verpakking en sluit die goed af.
4. Plaats de mouth-aid op de plek waar je ongemak hebt of die geïrriteerd is, en druk hem daar op zijn plaats.
5. Laat de strip 1-2 uur of langer zitten.
6. Eet of drink niets, zodat het verlichtende effect zo lang mogelijk aanhoudt.
7. Je kunt hem altijd lostrekken en normaal eten en drinken.



Alle rechten voorbehouden. Octrooi aangevraagd. Vervaardigd in de VS. Vervaardigd voor: ORTHONU, LLC. Rumson, NJ 07760, VS

