


Conforto e alívio com **mouth-aid!**

mouth-aid™

orthocare essentials™

Auxílio para tecidos moles na cavidade oral

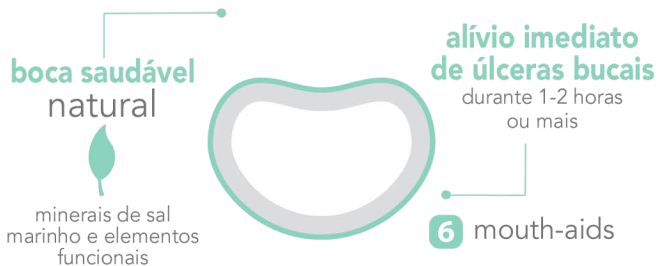

Protecção dos tecidos moles da parte interior dos lábios e bochechas

Alivia úlceras e irritações

Ideal para aparelhos, alinhadores, entre outros!



Conforto e alívio com **mouth-aid!**

mouth-aid™

orthocare essentials™

A formulação inovadora de **mouth-aid** foi criada por um ortodontista para fornecer uma solução orientada pela ciência e investigação para o desconforto durante o uso de aparelhos dentários e alinhadores. **mouth-aid** é uma das primeiras aplicações de alívio com ingredientes funcionais para qualquer irritação na sua boca. Quer se destine a aparelhos dentários ou alinhadores durante tratamentos ortodônticos, pode utilizar **mouth-aid** o número de vezes necessário.



- Fabricado com ingredientes funcionais e naturais
- Fornece a melhor formulação durante até 1 hora ou mais
- Alivia e protege a boca, a parte interior dos lábios e bochechas
- Protege os tecidos moles na cavidade bucal

Digitalizar para recomendar



Utilização das mouth-aid



1. Abrir a embalagem de mouth-aid e secar a área irritada.
2. Retirar uma mouth-aid pegando pelas extremidades.
3. Conservar a mouth-aid restante na embalagem e fechar a embalagem.
4. Aplicar a mouth-aid na área onde sentir desconforto ou irritação e pressionar na área
5. Manter a tira no local durante 1-2 horas ou mais.
6. Não comer ou beber durante esse período para maximizar os efeitos do alívio.
7. Remover em qualquer altura e comer e beber normalmente.

Todos os direitos reservados. Patente pendente. Fabricado nos EUA. Fabricado para: ORTHONU, LLC. Rumson, NJ 07760

Lote 030424 Prazo de validade 2026-03



8 50035 48903 1