


Détendez-vous et mâchez avec **OrthoChewz!**

ORTHO
CHEWZ™

orthocare essentials™

Remplace les pâtes à mâcher en silicone

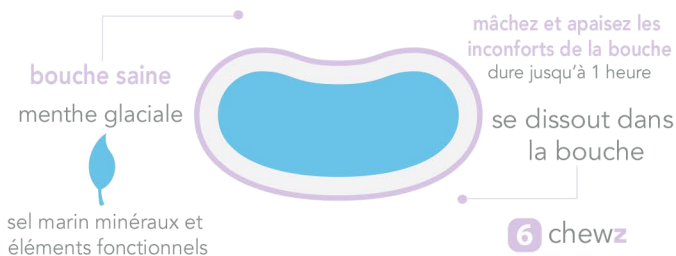

Positionnement et confort des gouttières ~
Confort des appareils orthodontiques

Soulage l'inconfort et la sécheresse buccale

Idéal pour les appareils orthodontiques,
les gouttières et d'autres encore !



Détendez-vous et mâchez avec **OrthoChewz!**

ORTHO
CHEWZ™

orthocare essentials™

- La formulation innovante de **OrthoChewz** a été créée par un orthodontiste afin d'apporter une solution basée sur la science et la recherche à la gêne occasionnée par le port de gouttières ou d'appareils orthodontiques. **OrthoChewz** est l'un des premiers produits à mâcher solubles qui contient des ingrédients bénéfiques et permet d'avoir une bouche saine. Au lieu d'utiliser des produits en silicone qui peuvent héberger des bactéries dans le boîtier de votre gouttière, vous pouvez maintenant utiliser notre pâte à mâcher soluble à tout moment et en tout lieu !



Scanner pour commander

- Soulage l'inconfort et la sécheresse buccale
- Détendez-vous, mâchez et soulagez les inconforts de votre bouche pendant 5 minutes et plus
- Se dissout dans la bouche et dure plus d'une heure
- Fabriqué avec des ingrédients fonctionnels et bénéfiques



Voici comment utiliser OrthoChewz

1. Ouvrez l'emballage d'OrthoChewz. Pour plus de fraîcheur, conservez-le au réfrigérateur.
2. Prenez 1 OrthoChewz et placez-le dans la bouche.
3. Conservez les OrthoChewz restants dans l'emballage et fermez-le.
4. Mettez vos gouttières en place et mâchez pendant 5 minutes ou à votre convenance.
5. Laissez OrthoChewz se dissoudre dans la bouche pendant plus d'une heure.
6. Si vous utilisez OrthoChewz pour un appareil orthodontique, vous pouvez vous détendre et mâcher à tout moment.

Ingrédients: Gélatine, Huile de Coco, Xylitol, Arôme naturel de menthe, Sucralose, Menthol, Sel de la mer morte, Sorbate de Potassium (pour assurer la fraîcheur), Eugéno, Bleu FD&C #1.

Tous droits réservés Brevet en instance Fabriqué aux États-Unis Fabriqué pour : ORTHONU, LLC. Rumson, NJ 07760

