


Mastica e rinfrescati con **OrthoChewz!**

ORTHO
CHEWZ™

orthocare essentials™

Sostituisce i chewie al silicone

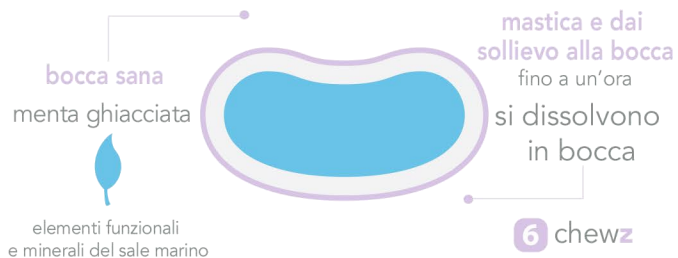

Sollievo per allineatori e apparecchi fissi

Attenua il disagio e la bocca secca

Ideale per apparecchi fissi, allineatori e altro ancora!



Mastica e rinfrescati con **OrthoChewz!**

ORTHO
CHEWZ™

orthocare essentials™

- La formula innovativa di **OrthoChewz** è stata creata da un ortodontista per una soluzione basata sulla scienza e sulla ricerca contro i disagi degli allineatori e degli apparecchi ortodontici. **OrthoChewz** è uno tra i primi chewie che si dissolve in bocca e contiene anche ingredienti attivi per una bocca sana. Per gli allineatori, invece di usare prodotti in silicone che possono ospitare batteri, ma ora puoi avere la comodità e i benefici dei nostri chewie solubili in qualsiasi momento, ovunque.



Scansiona per ordinare

- Attenua il disagio e la bocca secca
- Freschezza e sollievo, masticando per cinque minuti o più
- Si dissolve in bocca e dura per oltre un'ora
- Realizzati con ingredienti efficaci e benefici



Come usare OrthoChewz

1. Apri la confezione di OrthoChewz. Per ulteriore freschezza, conservala in frigorifero.
2. Estrai un OrthoChewz e mettilo in bocca.
3. Conserva i rimanenti OrthoChewz nella confezione ben chiusa.
4. Indossa l'allineatore e mastica per cinque minuti, o quanto vuoi.
5. Lascia che OrthoChewz si dissolva in bocca per oltre un'ora.
6. Mastica gli OrthoChewz anche con gli apparecchi fissi, quando vuoi.



Ingredienti: gelatina, olio di cocco, xilitolo, aroma naturale di menta piperita, sucralosio, mentolo, sale del Mar Morto, sorbato di potassio (per preservare la freschezza), eugenolo, blu FD&C n. 1.

Tutti i diritti riservati. Brevetti in corso di registrazione. Prodotto negli U.S.A. per: ORTHONU, LLC. Rumson, NJ 07760

