

¡Refréscuese y mastique con **OrthoChewz!**



**ORTHO
CHEWZ™**


orthocare essentials™

Sustituye los chewies de silicona

boca sana
menta glacial



componentes funcionales y
minerales de sales marinas

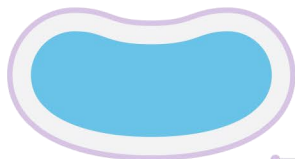

mastique y
alivie su boca
por hasta 1 hora
se disuelve
en la boca

6 chewz

Ajuste y alivio para alineadores ~
Confort para aparatos ortodónticos

Alivio de las molestias y la sequedad bucal

¡Ideal para alineadores, aparatos ortodónticos y más!



¡Refréscuese y mastique con **OrthoChewz!**

**ORTHO
CHEWZ™**

orthocare essentials™

- Los chewies **OrthoChewz** contienen una formulación innovadora creada por un ortodoncista, que brinda una solución derivada de la ciencia y las investigaciones para aliviar las molestias durante el uso de alineadores y aparatos ortodónticos. Los **OrthoChewz** están entre los primeros ajustadores masticables y disolubles del mercado que además brindan ingredientes beneficiosos para una boca sana. En lugar de usar productos de silicona que pueden albergar bacterias en los estuches de alineadores, disfrute ahora de la comodidad y las ventajas de este producto masticable disoluble, ¡en cualquier momento y en cualquier lugar!



Escanear para hacer pedidos

- Alivia las molestias y la sequedad bucal
- Enfríe, mastique y sienta alivio por hasta 5 minutos o más
- Se disuelve en la boca durante más de 1 hora
- Hecho con ingredientes funcionales y beneficiosos



Cómo usar OrthoChewz

1. Abra un paquete de OrthoChewz. Para más frescor, guárdelo en la nevera.
2. Saque 1 OrthoChewz y colóquelo en la boca.
3. Conserve los OrthoChewz restantes en el paquete; selle el paquete.
4. Póngase las bandejas de alineadores y mastique durante 5 minutos, o según lo desee.
5. Deje disolver el OrthoChewz en la boca alrededor de una hora.
6. Si usa OrthoChewz para aparatos ortodónticos, enfríelos y mástiquelos en cualquier momento.



Ingredientes: Gelatina, aceite de coco, xilitol, sabor de menta natural, sacarosa, mentol, sales del Mar Muerto, sorbato de potasio (para proteger la frescura), eugenol, azul FD&C n.º 1.

Reservados todos los derechos. Patente en tramitación. Hecho en EE. UU. Fabricado para: ORTHONU, LLC. Rumson, NJ 07760

